

Qualität und Funktion

Prothesenfuß

**Uniprox
Chopart**

mehr auf
www.uniprox.de



F310 Uniprox Chopart

Leistungsstarke Glasfaserfeder für Vorfußamputation, die trotz kurzer Federlänge dynamische Elastizität und Energierückgabe bietet.

F310 Uniprox Chopart

Leistungstarke Glasfaserfeder für Vorfußamputation

- Robuste Glasfaser-Konstruktion in 6 Federkategorien
- Süß- und salzwasserbeständig
- Inkl. Fußkosmetik, Spectra-Socke und 2-Komponenten-Kleber
- 2 Jahre Garantie (Fußkosmetik 6 Monate)



< 159 kg



Bestell-Nr.	Größen	Absatzhöhe	Einbauhöhe	Gewicht	Artikelnummer
F310- <input type="text" value="Größe"/> <input type="text" value="Seite"/> <input type="text" value="Kategorie"/>	22 – 30	10 mm	ca. 15 mm (inkl. Kosmetik)	415 g (Gr. 26)	4 603 180 0X 0Y 0ZZ

Seite: L = links, R = rechts _ Beispiel: Fuß F310 in Größe 26, Seite rechts, Kategorie 2 → Bestell-Nr. F310-26R2

X = Seite: 1 = links, 2 = rechts _ Y = Kategorie _ ZZ = Größe (siehe lieferbare Größen)

Beispiel: Fuß F310 in Größe 26, Seite rechts, Kategorie 2 → Artikelnummer 4 603 180 02 02 026

Auswahltabelle

Kategorie	Fußgröße	Niedrige Belastung	Mittlere Belastung	Hohe Belastung
		Wandern, Golf	Bergwandern, Jogging, Ski	Tennis, Fußball, Basketball
1	22 – 27	33 – 64 kg	33 – 64 kg	/
2	22 – 28	65 – 79 kg	65 – 79 kg	33 – 64 kg
3	22 – 29	80 – 95 kg	80 – 95 kg	65 – 79 kg
4	23 – 30	96 – 111 kg	96 – 111 kg	80 – 95 kg
5	24 – 30	112 – 127 kg	112 – 127 kg	96 – 111 kg
6	25 – 30	128 – 159 kg	128 – 159 kg	112 – 127 kg

Anleitung zur Kategorieauswahl

Um die Auswahl zu optimieren und die Sicherheit des Amputierten zu gewährleisten, befolgen Sie die beiden folgenden Schritte zur Bestimmung der geeigneten Kategorie:

1. Suchen Sie die Spalte, die dem Belastungsgrad des Amputierten entspricht.
2. Suchen Sie in der ausgewählten Spalte das Gewicht des Amputierten.

Wenn der Patient einen langen US-Stumpf hat, schwere Lasten trägt oder innerhalb eines Jahres einen höheren Belastungsgrad erreicht wird, wählen Sie die nächsthöhere Kategorie.

Achtung: Wenn Sie eine Kategorie wählen, die niedriger ist als die, die auf der Grundlage des oben genannten Verfahrens und der Patientendaten empfohlen wird, erlischt die Garantie. Wenn das Gewicht Ihres Patienten die in der Tabelle angegebenen Grenzwerte überschreitet, rufen Sie bitte den Kundendienst an.